



简便的操作程序：



把检测卡从包装盒中取出，
不要碰触检测卡上打孔的部位。

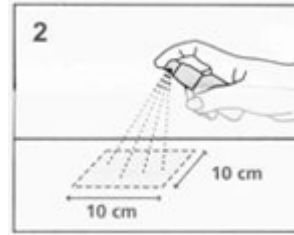

用装有清洁水的喷瓶在被测表面上
轻喷两下，对表面进行预湿润。

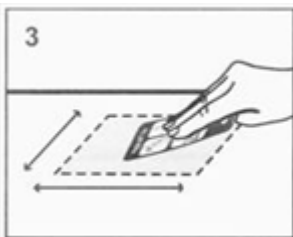

把检测卡上打孔部位在被测表面上擦拭。



等待30秒钟观察检测卡上颜色的变化。

结果解释

检测卡打孔部位的颜色将随着被测表面残留蛋白含量的多少，从黄色变为绿色再到蓝色，试剂孔的颜色变得越蓝，检测到的蛋白越多。若表面是清洁的，则试剂卡的颜色不会变化，仍为黄色，表面经过正确的清洁不应该残留多于50 μg 的蛋白。